

# QuickSplint®



## Custom-fit Interim Bite Plane

### Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Temporary treatment of acute jaw joint and muscle sprain/strain along with the relief of associated headaches and pains.



## Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.  
©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is a registered trademark of Orofacial Therapeutics, LP. All rights reserved. Made in USA

1-619-303-4606 | [QuickSplint.com](http://QuickSplint.com)

PN D-3002RevG



See instructions for use  
 Ver las instrucciones  
 Voir les instructions pour l'utilisation  
 Veja as instruções de utilização  
 Vedere le istruzioni per l'uso  
 Siehe Gebrauchsanweisung  
 Zie de instructies voor het gebruik



Date of manufacture  
 Fecha de fabricación  
 Date de fabrication  
 Data de fabrico  
 Data di produzione  
 Datum der Herstellung  
 Datum van fabricage



Manufacture  
 Fabricante  
 Fabricant  
 Fabricante  
 Produttore  
 Hersteller  
 Fabrikant




Use by  
 Su uso per  
 Utilisation par les  
 Validade  
 Da usare entro  
 Die Nutzung durch  
 Houdbaar to

Truer Medical, Inc.  
 An ISO 13485 Registered Co.  
 1050 N. Batavia Ave. Suite C  
 Orange, California 92867 USA



Batch Code  
 Código de lote  
 Code de lot  
 Código do lote  
 Codice lotto  
 Batch Code  
 Batch Code

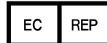

Advena Ltd.  
 Pure Offices  
 Plato Close,  
 Warwick CV34 6WE UK



10° C - 24° C  
 50° F - 75° F



<b>EN</b>	Prescriber Instructions .....	<b>4</b>
<b>ES</b>	Instrucciones para el especialista .....	<b>8</b>
<b>FR</b>	Instructions du prescripteur .....	<b>22</b>
<b>PT</b>	Instruções para o médico dentista .....	<b>16</b>
<b>IT</b>	Istruzioni per il medico prescrivente.....	<b>20</b>
<b>DE</b>	Anweisungen für den Verschreibenden....	<b>24</b>
<b>NL</b>	Instructies voor de voorschrijver.....	<b>28</b>



## Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.  
 ©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is  
 a registered trademark of Orofacial Therapeutics,  
 LP. All rights reserved. Made in USA  
**1-619-303-4606 | QuickSplint.com**

PN D-3002RevG

---

To Reorder go to:  
**QuickSplint.com**  
 or CALL 1-800-760-0526

---

# QuickSplint®

Custom-fit Interim Bite Plane



## Instructions du prescripteur

### Indications thérapeutiques

- Protection et réhabilitation des dents après blessures dues au bruxisme ou à des serremments.
- Soulagement temporaire de la tension musculaire, des maux de tête et de la douleur associée au bruxisme ou aux serremments.
- Traitement temporaire d'un déboitement de la mâchoire ou d'une entorse musculaire aiguë ainsi que soulagement des maux de tête et des douleurs associées.

### Avis de non-responsabilité

QuickSplint® peut ne pas convenir à tous les patients. Ce produit doit être utilisé avec précaution chez les patients atteints de mobilité restreinte ou d'hypermobilité de la mâchoire.

### Remarque

QuickSplint s'emploie principalement lors du sommeil pour prévenir des douleurs ou dommages aux dents ou des réhabilitations résultant de pressions intenses exercées sur les dents par des activités telles que broyage, bruxisme ou serrement. Sous votre supervision, vous pouvez suggérer au patient de porter le QuickSplint pendant la journée également afin de soulager la douleur ou pour favoriser la guérison après une procédure chirurgicale.


### À usage unique

### Contre-indications

Allergies connues au Lexan121 ou au Vinyl Polysiloxane (VPS).

### Mises en garde

- Évitez d'appliquer le QuickSplint sur des dents compromises.
- QuickSplint n'est pas recommandé pour le port en continu (24 heures par jour).
- Le revêtement en vinyle polysiloxane doit couvrir les trois dispositifs de rétention du QuickSplint. Sinon, il faut le recharger et refaire le QuickSplint.
- Vérifiez la bonne stabilisation et rétention du QuickSplint pour éviter un délogement ou une perte lors de son utilisation.

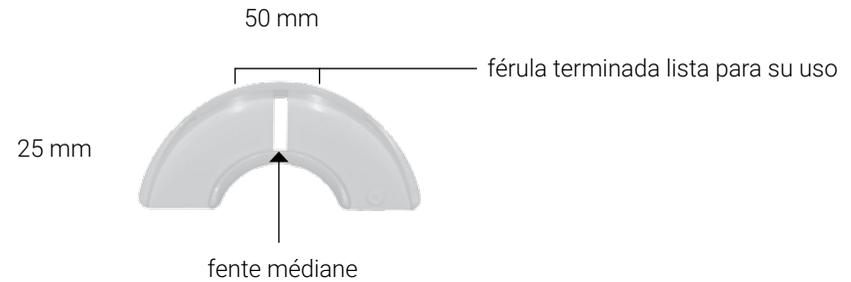

### Aperçu

QuickSplint est conçu pour créer sur mesure un dispositif rapide et prêt à l'emploi en vue d'une thérapie orale temporaire. Les caractéristiques brevetées de QuickSplint permettent de le fabriquer sans utiliser d'adhésifs. Lorsqu'ils sont remplis de polysiloxane de vinyle (VPS), les deux orifices de débordement sur le rebord du support et dans la fente médiane à la base du support retiendront le VPS. Pour une meilleure rétention et pour se conformer à la dentition du patient, le VPS doit déborder du support, de la fente médiane et des orifices de débordement.

Un VPS à prise rapide et consistance épaisse dans la cartouche ou pâte fournit la meilleure viscosité et assure un bon ajustement. Il est essentiel de bien choisir les matériaux avant d'appliquer le QuickSplint.

*Pour plus d'informations sur la façon de fabriquer un QuickSplint, voir la vidéo d'instruction sur [QuickSplint.com](http://QuickSplint.com) ou le canal YouTube QuickSplint, qui contient des conseils et des techniques.*


### VOUS AUREZ BESOIN DE CE QUI SUIT

1. De 7 à 9cc de matériau d'empreinte en Vinyl Polysiloxane (VPS) à prise rapide et consistance épaisse sous forme de pâte ou de cartouche, un pistolet automix et des embouts mélangeurs. Des adhésifs ne sont pas requis. Si vous utilisez de la pâte, vous aurez besoin de 4cc de catalyseur et de 4cc de base, à mélanger à la main.
2. Des gants de protection.
3. Une lame tranchante tel qu'un scalpel pour élaguer.

### NOUS FOURNISSONS CE QUI SUIT

1. QuickSplint dans son propre emballage.
2. Instructions patient dans le boîtier de rangement.

**Pour de nouvelles commandes, consultez :  
[QuickSplint.com](http://QuickSplint.com)**

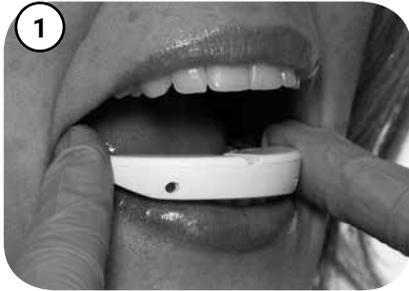

**Étape 1:**  
**Déterminer l'arche buccale**

Déterminez quelle arche buccale fournira la plus grande surface de contact entre la dent et le QuickSplint. Demandez au patient s'il préfère porter le QuickSplint sur l'arche buccale supérieure ou inférieure. Vérifiez le bon ajustement du QuickSplint au palais du patient. Insérez le QuickSplint. Puis demandez au patient de fermer la bouche pour confirmer.



**Étape 2:**  
**Remplir le Splint**

Remplissez le QuickSplint de matériau VPS de manière uniforme. Le VPS devrait déborder du support.



**Étape 3:**  
**Remplir la fente médiane**

Retournez le support et remplissez de VPS la fente médiane.



**Étape 4:**  
**Ajuster le Splint**

Alignez le QuickSplint sur les dents supérieures ou inférieures pendant que le patient referme complètement la bouche pour stabiliser le QuickSplint. Ceci permet d'obtenir une empreinte de la dentition par pression contre l'arche opposée. Le VPS va déborder du QuickSplint, et envahir les dispositifs de rétention et les dents. Pour l'arche supérieure, demandez au patient d'utiliser sa langue pour positionner lentement et doucement le matériau contre l'arrière des dents, ainsi que dans la région du palais, afin de maximiser la rétention.



**Étape 5:**  
**Retirer le Splint**

Après durcissement du VPS, retirez délicatement le QuickSplint.



**Étape 6:**  
**Élaguer le Splint**

Élaguez tout excès de matériau avec une lame tranchante. Utilisez le support comme guide. Remplacez le QuickSplint sur les dents du patient et vérifiez sa stabilité et sa rétention contre la dent afin d'éviter tout déplacement à l'usage. Le QuickSplint est maintenant prêt à être utilisé !

**Instructions de nettoyage**

1. Évitez un brossage dur ou d'autres techniques de nettoyage qui pourrait déchirer ou déformer le matériau VPS.
2. Lavez tous les jours dans l'eau chaude, rincez abondamment et laissez sécher à l'air.
3. Désinfectez périodiquement par trempage dans un mélange de rince-bouche et d'eau pendant dix minutes.



Splint terminé prêt à l'emploi

# QuickSplint®

DIAGNOSE  
TREAT  
PROTECT  
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane



To Reorder go to:  
[QuickSplint.com](http://QuickSplint.com)  
or CALL 1-800-760-0526

Para realizar nuevos pedidos, visite:

Pour de nouvelles commandes, consultez :

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar:

Nachbestellungen unter:

Para encomendar novamente, vá a:

[QuickSplint.com](http://QuickSplint.com)