

QuickSplint®



Custom-fit Interim Bite Plane

Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Temporary treatment of acute jaw joint and muscle sprain/strain along with the relief of associated headaches and pains.



 **Orofacial Therapeutics**

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is
a registered trademark of Orofacial Therapeutics,
LP. All rights reserved. Made in USA

1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG



See instructions for use
 Ver las instrucciones
 Voir les instructions pour l'utilisation
 Veja as instruções de utilização
 Vedere le istruzioni per l'uso
 Siehe Gebrauchsanweisung
 Zie de instructies voor het gebruik



Date of manufacture
 Fecha de fabricación
 Date de fabrication
 Data de fabrico
 Data di produzione
 Datum der Herstellung
 Datum van fabricage




Manufacture
 Fabricante
 Fabricant
 Fabricante
 Produttore
 Hersteller
 Fabrikant
 Truer Medical, Inc.
 An ISO 13485 Registered Co.
 1050 N. Batavia Ave. Suite C
 Orange, California 92867 USA



Use by
 Su uso per
 Utilisation par les
 Validade
 Da usare entro
 Die Nutzung durch
 Houdbaar to



Batch Code
 Código de lote
 Code de lot
 Código do lote
 Codice lotto
 Batch Code
 Batch Code

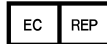

Advena Ltd.
 Pure Offices
 Plato Close,
 Warwick CV34 6WE UK



10° C - 24° C
 50° F - 75° F



EN	Prescriber Instructions	4
ES	Instrucciones para el especialista	8
FR	Instructions du prescripteur	22
PT	Instruções para o médico dentista	16
IT	Istruzioni per il medico prescrivente.....	20
DE	Anweisungen für den Verschreibenden....	24
NL	Instructies voor de voorschrijver.....	28

Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
 ©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is
 a registered trademark of Orofacial Therapeutics,
 LP. All rights reserved. Made in USA
1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG

To Reorder go to:
QuickSplint.com
 or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint®

Custom-fit Interim Bite Plane



Istruzioni per il medico prescrivente

Indicazioni per le condizioni d'uso di utilizzo

- Protezione dei denti e dei restauri da lesioni dovute a bruxismo e serramento.
- Sollievo temporaneo da tensione muscolare, mal di testa e dolore associati a bruxismo o serramento.
- Trattamento temporaneo di distorsione/tensione acuta dell'articolazione mascellare e muscolare nonché del sollievo da mal di testa e dolori associati.

Avvertenza

QuickSplint® potrebbe non essere adatto a tutti i pazienti. Questo prodotto deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con restrizioni di mobilità mascellare o ipermobilità.

Nota

QuickSplint deve essere utilizzato principalmente durante il sonno per prevenire dolori o danni ai denti o ai restauri derivanti da pressioni esagerate sui denti mediante l'azione conosciuta come digrignamento, bruxismo o serramento. Si può consigliare al paziente di portare QuickSplint durante il giorno sia per alleviare il dolore che per favorire la guarigione da interventi chirurgici, sotto la propria direzione.


Uso da parte del singolo paziente

Controindicazioni

Allergie note a Lexan121 o Polivinilsilossano (VPS).

Avvertenze

- QuickSplint non dovrebbe essere applicato su denti danneggiati.
- QuickSplint non è consigliato per un uso continuo (24 ore al giorno).
- Il rivestimento in Polivinilsilossano deve agganciarsi alle 3 caratteristiche di ritenzione di QuickSplint oppure dovrete ricaricare e riparare il QuickSplint.
- Assicuratevi che QuickSplint abbia un posizionamento stabile e una ritenzione adeguata per impedire lo spostamento o la perdita durante l'uso.

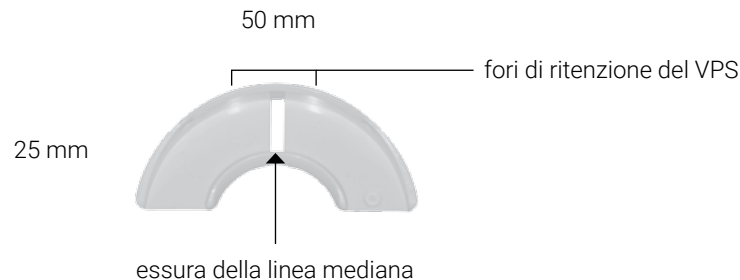

Panoramica

QuickSplint è stato progettato per creare un apparecchio personalizzato rapido e pronto all'uso per la terapia orale di transizione. Le caratteristiche brevettate di QuickSplint consentono la produzione senza l'uso di adesivi. Quando viene riempito con il Polivinilsilossano (VPS), i due fori di troppopieno sul bordo della vaschetta e la fessura della linea mediana sul suo fondo tratterranno il VPS. Il VPS dovrebbe riempire in modo eccessivo tutta la vaschetta, la fessura della linea mediana e i fori di troppopieno per ottenere la ritenzione e il posizionamento ottimali per la dentatura del paziente.

Il VPS di applicazione veloce e di struttura pesante in cartuccia o stucco fornisce la migliore viscosità per garantire un posizionamento sicuro. [La scelta di questi materiali è fondamentale per la vostra esperienza con QuickSplint.](#)

Per ulteriori informazioni su come preparare QuickSplint, vedere il video informativo su [QuickSplint.com](#) oppure il canale YouTube di QuickSplint, che contiene suggerimenti e tecniche.

AVRETE BISOGNO DI QUANTO SEGUE

1. Da 7 ml a 9 ml di materiale di registrazione del morso del Polivinilsilossano (VPS) di applicazione veloce e di struttura pesante sotto forma di cartuccia o stucco, una pistola automiscelante e puntali di miscelazione. Gli adesivi non sono necessari. Se state utilizzando lo stucco, avrete bisogno di 4 ml di catalizzatore e 4 ml di base, da miscelare insieme a mano.
2. Guanti protettivi
3. Una lama affilata come quella di un bisturi per la rifilatura

NOI FORNIAMO

1. QuickSplint nel proprio contenitore
2. Le istruzioni per il paziente all'interno del contenitore

**Per Riordinare andate su:
QuickSplint.com**



**Fase 1:
Determinare l'arcata**

Determinare quale arcata fornirà il massimo contatto dentale sulla superficie di QuickSplint o se il paziente preferisce portare QuickSplint sull'arcata superiore o inferiore. Verificare che QuickSplint si adatti all'arcata del paziente inserendolo nella sua bocca e confermare chiedendo al paziente di chiuderla.



**Fase 2:
Riempire il tutore**

Riempire QuickSplint in modo eccessivo e uniforme con il materiale del VPS. Il VPS dovrebbe straripare dalla vaschetta.



**Fase 3:
Riempire la fessura
della linea mediana**

Ribaltare la vaschetta e riempire la fessura della linea mediana con il VPS.



**Fase 4:
Collocare il tutore**

Allineare QuickSplint ai denti superiori o inferiori e sostenerlo mentre il paziente chiude completamente la bocca per collocare il QuickSplint. Questo uniforma la registrazione del morso rispetto all'arcata opposta. Il VPS strariperà da QuickSplint, agganciandosi alle caratteristiche di ritenzione e ai denti. Per l'arcata superiore, spiegare al paziente di utilizzare la lingua lentamente e delicatamente per posizionare il materiale contro il retro dei denti e sul palato o la superficie linguale, per ottimizzare la ritenzione.



**Fase 5:
Togliere il tutore**

Dopo l'applicazione del VPS, togliere delicatamente il QuickSplint.



**Fase 6:
Tagliare il tutore**

Tagliare qualsiasi materiale in eccesso con una lama affilata. Utilizzare la vaschetta come guida. Rimettere QuickSplint sui denti del paziente e assicurarsi che ci sia un posizionamento stabile e una ritenzione sui denti per evitare possibili spostamenti con l'uso. QuickSplint è ora pronto per l'uso!



Istruzioni per la pulizia

1. Evitare di spazzolare forte o altre tecniche di pulizia che potrebbero rompere oppure deformare il materiale del VPS.
2. Lavare quotidianamente con acqua calda, sciacquare accuratamente e fare asciugare all'aria.
3. Disinfettare regolarmente immergendolo per dieci minuti in una miscela di metà collutorio e metà acqua.



Tutore finale, pronto per l'uso

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane



To Reorder go to:
QuickSplint.com
or CALL 1-800-760-0526

Para realizar nuevos pedidos, visite:

Pour de nouvelles commandes, consultez :

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar:

Nachbestellungen unter:

Para encomendar novamente, vá a:

QuickSplint.com